


*SurgiTel*<sup>®</sup>

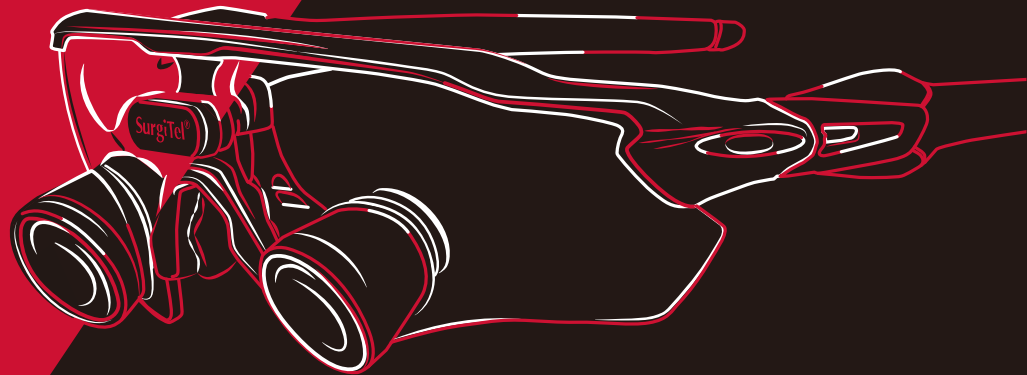

サージテル スルーザレンズタイプ ユーザーズガイド

 Oral Care

このたびは、サージテル製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。

- ご使用の前に必ずこの『ユーザーズガイド』をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。
- 本書は、製品と一緒に大切に保管してください。

このガイドでは誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
次の表示で区分して説明しています。



**禁止**

製品の取り扱いにおいて  
その行為を禁止



**注意**

誤った取り扱いをしたときに、  
故障・損傷または事故・怪我  
に結びつくもの

## 目次

サージテル スルーザレンズタイプ ユーザーズガイド

禁止事項	4
注意事項	5
各部の名称	6~7
使い方 <b>1</b>	①フレームをかける / ②ストッパーで固定する 8
使い方 <b>2</b>	③LEDライトの付け外し 9
メンテナンス セルフチェックリスト	10~12




主な交換パーツ・アクセサリ	13
修理連絡先・修理品送付先	14



禁止


- 水洗いをしないでください。鏡筒の中に水が入り、曇りの原因となります。
- アルコールや酸・アルカリ等の洗浄剤を使わないでください。コーティング剤が剥がれる原因となります。
- 殺菌灯、オートクレーブ等を使つての消毒・滅菌・殺菌も避けてください。劣化や損傷につながります。
- 鏡筒を持って強く動かさないでください。接着剥がれや脱落の原因となります。

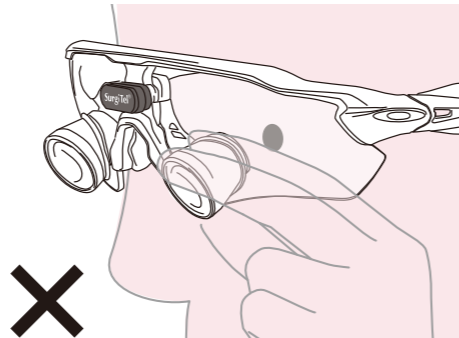





注意

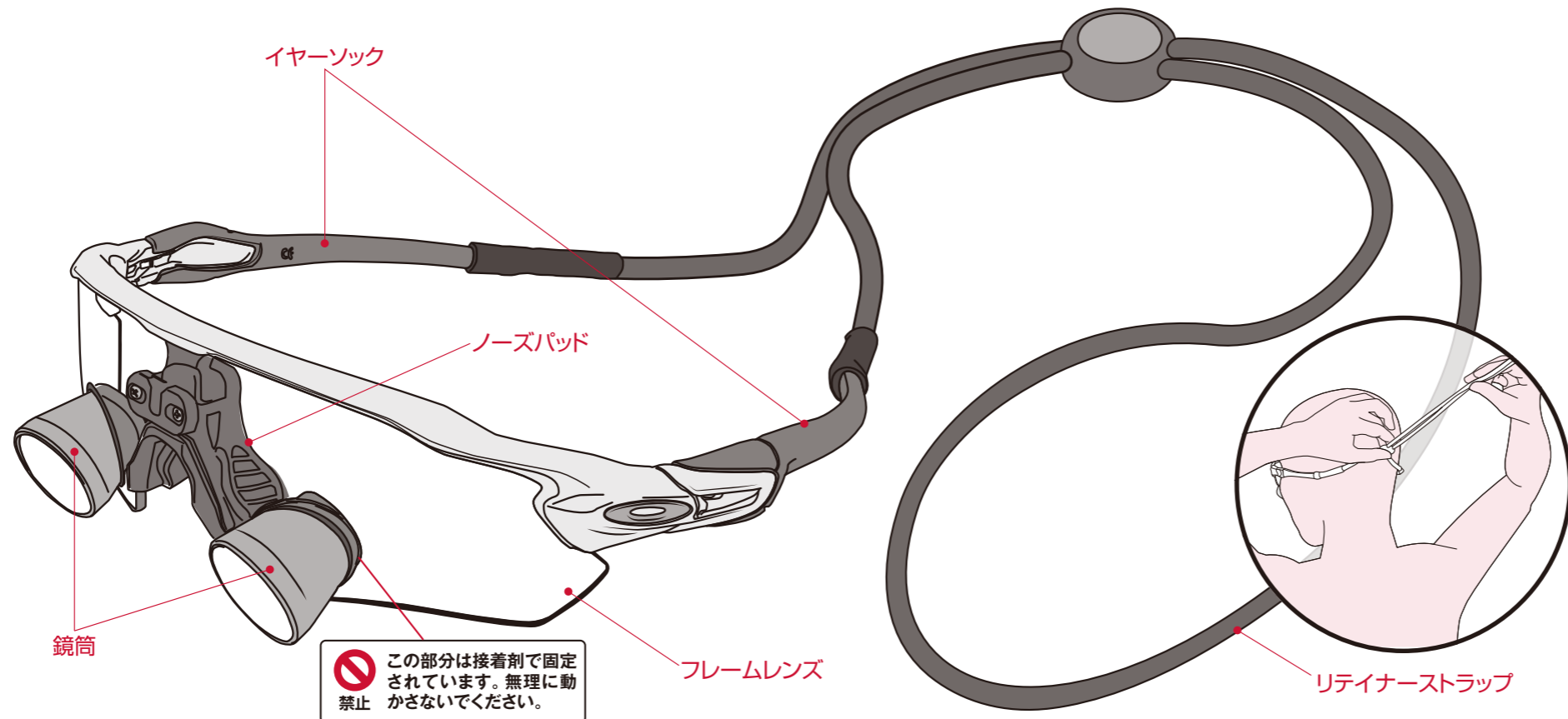- フレームのかけ外しは、必ず両手で行ってください。フレームのひび割れや変形の原因となります。
- エアコンの吹き出し口付近等、極端に高温または低温(40度以上または5度以下)になる場所に置かないでください。鏡筒内に結露が生じたり劣化の原因となります。
- ルーペを通して太陽を見ないでください。
- 分解・改造および弊社指定機関以外で修理された製品の故障または損害について、弊社は一切責任を負いかねます。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。






この部分は接着剤で固定されています。無理に動かさないでください。

その他内容物	
<p>レンズキャップ</p> 	<p>RadarEV用ワイヤーノーズキット</p>  <p>※まつ毛が当たる方やフレームレンズのくもりが気になる方は、こちらを取り付けて調整してください。</p>
<p>サージテルロゴプレート</p>  <p>※ライトを装着しない場合、フレーム中央部の溝にお好みで取り付けてください。</p>	<p>清掃用クロス</p> 


梱包箱を開けたら、付属品がそろっていることをご確認ください。

### 1 フレームをかける

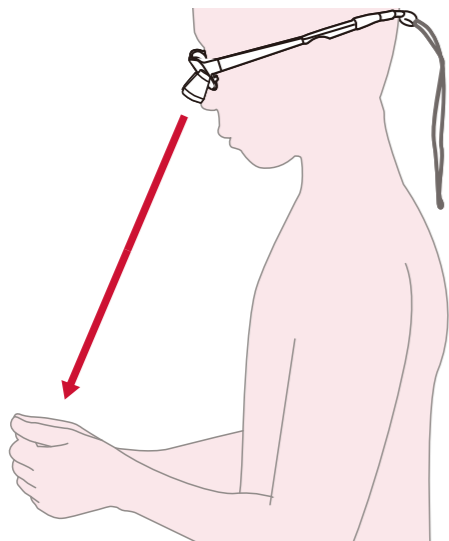

眼球とレンズと対象物が一直線となる位置でフレームをかけます。

### 2 ストッパーで固定する

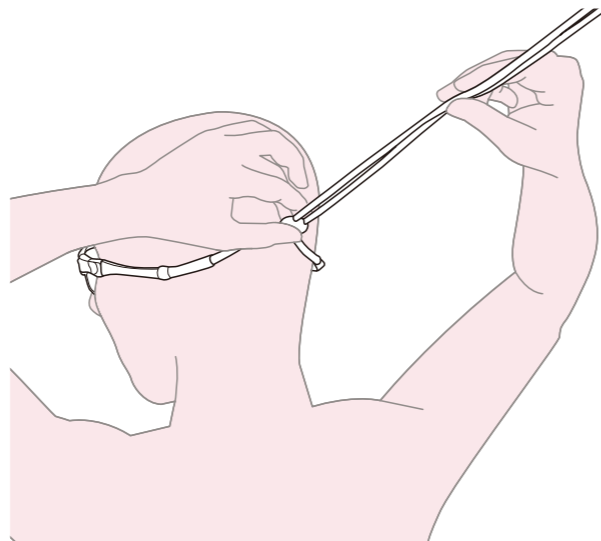


ストラップのストッパーでフレーム位置を固定します。

**POINT**

ストッパーをきつく締めすぎると、フレームが吊られて位置がずれてしまいます。診療中にずれない程度で軽く固定してください。


### 3 LEDライトの付け外し

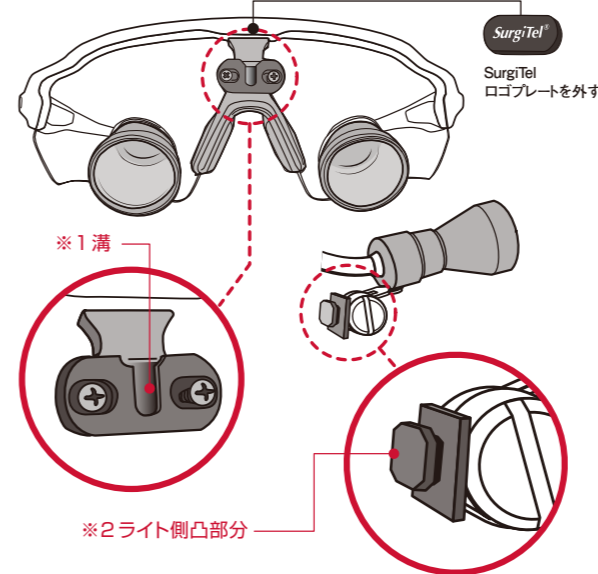

**取り付け**


フレーム中央部の溝※1に、ライト側の凸部分※2を上からスライドさせて差し込みます。

ライトケーブルの取り付け方法は、LEDライトシステム ユーザーズガイド P.9をご参照ください。

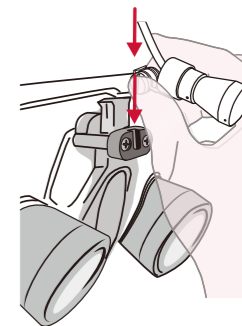


**取り外し**

ライトを図のように持ち、上にスライドさせるように取り外してください。

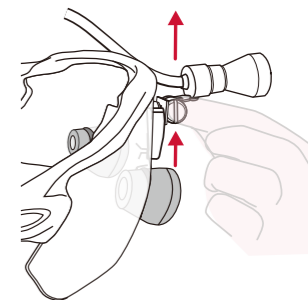

**FLMタイプのルーペでライトをご使用中の方**

コの字型の部品を上下にスライドし取り外してから、記載どおりの手順でライトを取り付けてください。

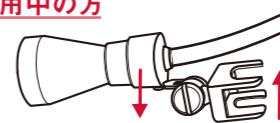


注意

付け外しの際、スライドしにくい場合があります。無理に動かすと破損の原因となりますので、ゆっくりと付け外しをしてください。  
ライトの使用直後は、ライトヘッドが熱くなります。

サージテル スルーレンズタイプ ルーペを安全にご使用いただくためのチェックリストです。  
 日々ご使用前に確認し、破損や消耗が見られた場合はサージテル・カスタマーセンターまでご連絡ください。  
 ご希望の場合、専門スタッフによる点検・メンテナンス等もお受けいたします。  
 (P.14の修理連絡先・修理品送付先をご参照ください)


オキュラーレンズを固定している接着剤が劣化していないか

※接着剤の変色・白色化・光沢感の消失によって判断できます。

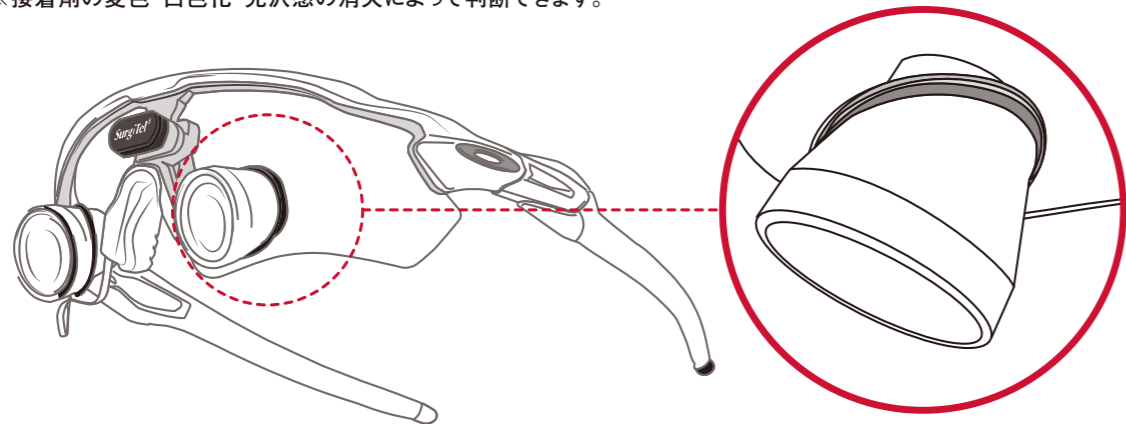


**禁止** 自己改造・再接着等を行なった場合、修理が受けられなくなる場合があります。


フレームレンズにひび、欠け、大きな傷やコーティング剥がれがないか

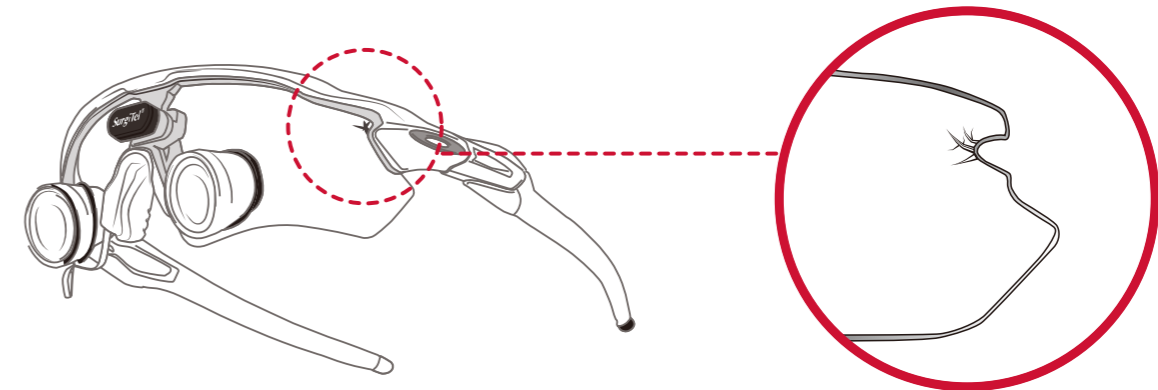

**禁止** 自己改造・再接着等を行なった場合、修理が受けられなくなる場合があります。

ノーズパッド、リテイナーストラップは消耗していないか

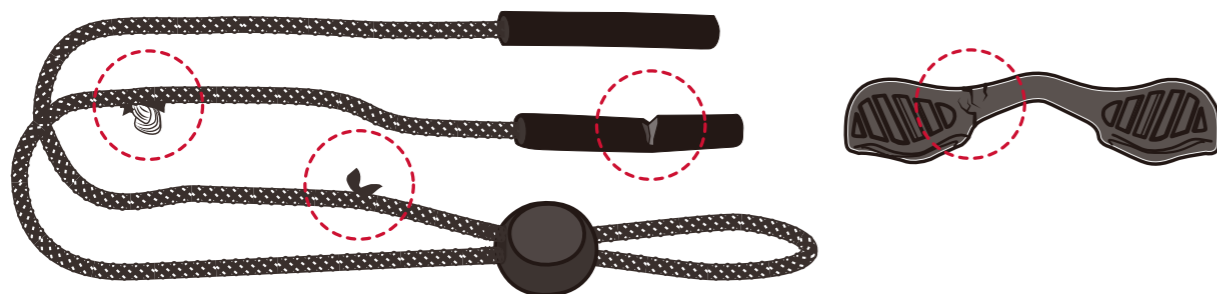

 自己改造・再接着等を行なった場合、修理が受けられなくなる場合があります。



Webサイトから  
ご注文いただけます。▶



保証期間1年（製品出荷日から1年と30日間）

**【保証期間内】**

株式会社オーラルケア サージテル修理チーム

〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西4-21-3

Tel: 0120-149-386 Fax: 0120-449-386 Mail: [surgitel@oralcare.co.jp](mailto:surgitel@oralcare.co.jp)

**【保証期間終了後】**

株式会社マグニファイ・フューチャー・コミュニケーション サージテルリペアサービス

〒125-0062 東京都葛飾区青戸5-9-6-102

Tel: 03-6662-4901 Fax: 03-6662-4903 Mail: [surgitel-repair@mf-communication.com](mailto:surgitel-repair@mf-communication.com)

株式会社オーラルケア サージテル・カスタマーセンター

☎0120-149-386 ☎0120-449-386

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9 ✉ [surgitel@oralcare.co.jp](mailto:surgitel@oralcare.co.jp)

LINE 登録はこちら  
LINE ID: @surgitel ▶



 Oral Care  
<https://www.oralcare.co.jp>